

Verwendung des Marshall (MIRAD) Mucosal Intranasal Rapid Atomisation Device

Marshall
EXCELLENCE AS STANDARD

MD



Tipps Zur Verbesserung Des Erfolgs


- Verwenden Sie immer die richtige Wirkstoffkonzentration.
- Verwenden Sie immer beide Nasenlöcher, um eine ausreichende Schleimhautbedeckung für die Wirkstoffaufnahme zu gewährleisten.
- Achten Sie auf ungewöhnliche Merkmale der Schleimhaut, da diese die Aufnahme des Wirkstoffs einschränken können. Möglicherweise müssen Sie eine alternative Verabreichungsmethode in Betracht ziehen.

Produkt: MIRAD

Code: 300350


NPC Code :FDF 2263

VORBEREITUNG

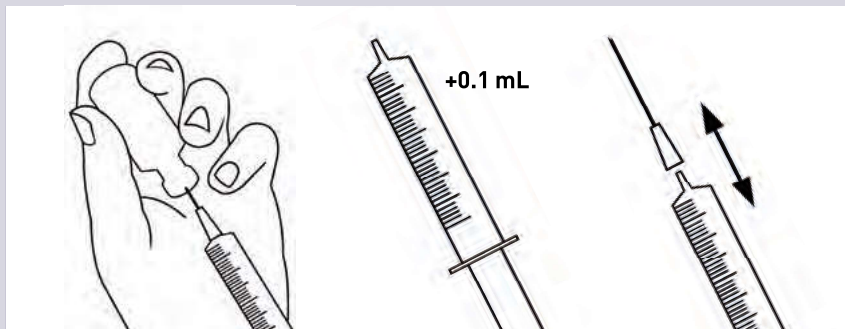

Durchstechen Sie das Medikamentenfläschchen mit einer Aufzieh-/Stumpfnadel. Ziehen Sie die erforderliche Medikamentendosis für die Behandlung aus dem Fläschchen auf. Stellen Sie sicher, dass zusätzlich 0,1 ml des Medikaments in die Spritze aufgezogen werden, um eine ausreichende Wirkstoffabgabe zu gewährleisten. Entfernen Sie die Aufzieh-/Stumpfnadel von der Spritze.

VERFAHREN

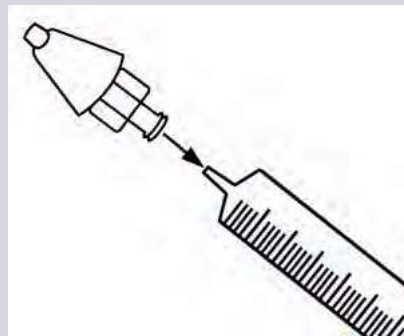


SCHRITT 1

Befestigen Sie das MIRAD NasalTM Device mit dem Luer-Lock an der Spritze.




SCHRITT 2

Halten Sie mit der freien Hand den Kopf des Patienten stabil und platzieren Sie die Spitze des MIRAD NasalTM Device gegen das Nasenloch, leicht nach oben und außen in Richtung der Ohrmuschel Oberkante zeigend.

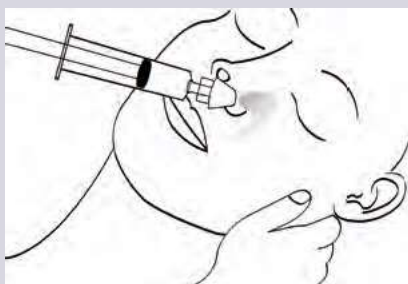

SCHRITT 3

Verabreichen Sie die Hälfte des Medikaments in das Nasenloch, indem Sie den Spritzenkolben fest drücken.

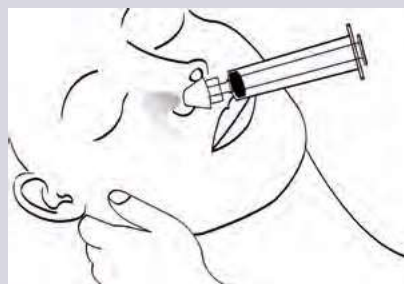

SCHRITT 4

Falls angezeigt, bewegen Sie das MIRAD NasalTM Device zum anderen Nasenloch und wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, indem Sie das restliche Medikament in das andere Nasenloch verabreichen.



Vertrieben von : Marshall Airway Products Ltd,
Suite 3H1, St Peters Park, Cobblers Way,
Radstock BA3 3BX U.K.
Tel: 0845 612 8888
Email: sales@marshallproducts.co.uk
Web: www.marshallproducts.co.uk



Hergestellt von: Three Lions Ltd.
No. 21 Qunyi Private Zone, Heng-shan Road, Kunshan, Jiangsu,
P.R.China, 215300



Europäischer Bevollmächtigter: Wellkang Ltd.

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,
Derry, BT48 8SE, Northern Ireland, U.K.



UK Verantwortliche Person: Marshall Airway Products Ltd.
Suite 3H1, St Peters Park, Cobblers Way, Radstock BA3 3BX
U.K.

