

schülke →



Trockene Tücher zur Tränkung mit
Flächendesinfektionsmittel. Optimaler Schutz vor
Kontamination durch die schülke wipes safe & easy.

CE 0297

schülke wipes safe&easy

Unser Plus

- keine Aufbereitung notwendig
- sehr einfache Handhabung
- Medizinprodukt

Anwendungsgebiet

Die schülke wipes safe & easy können mit ausgewählten Desinfektionsmitteln getränkt werden. Je nach Auswahl der Produkte eignet sich der gebrauchsfertige Einmal-Feuchttuchspender zur Reinigung oder Desinfektion von nicht-invasiven Medizinprodukten und Flächen. Aufgrund der sehr einfachen Handhabung, des schützenden bag-in-box, als auch der Einmalverwendung des Bagless Eimers sind die schülke wipes safe & easy das ideale Desinfektionstuch für den Einsatz in Bereichen, in denen ein besonders großes Risiko der Übertragung von pathogenen Keimen besteht, wie u. a. Isolierzimmer, OP oder auch die Neonatologie. Patientennahe Flächen und Flächen mit häufigem Hand- oder Hautkontakt stehen im Fokus der Anwendung.

safe - das Kontaminationsrisiko wird signifikant minimiert, da die Behältnisse (Eimer / Beutel) nur einmal verwendet werden.

easy - weil das Handling besonders einfach ist.

Anwendungshinweise

Befüllung unter hygienischen Bedingungen

Zunächst die Hände desinfizieren und frische Schutzhandschuhe und Kittel anziehen. Bitte während des Befüllungsvorgangs darauf achten, dass die Handschuhe nicht durch andere Tätigkeiten kontaminiert werden. Gießen Sie einmalig 2 Liter bei einem gebrauchsfertigen Produkt oder 2,5 Liter Gebrauchslösung aus einem angesetzten Konzentrat langsam

spiralförmig über die Vliesrolle im Eimer. Verwenden Sie hierzu nur die von schülke empfohlenen Präparate und Konzentrationen. Fädeln Sie das innerste Tuch der Rolle in die sternförmige Entnahmeöffnung des Deckels ein und verschrauben Sie den Deckel fest. Die Tücher sind nach 30 Minuten Wartezeit vollständig durchtränkt und gebrauchsfertig. Dokumentieren Sie in der Zwischenzeit den Präparatenamen, die gewählte Einsatzkonzentration, die Einwirkzeit und das Befülldatum auf dem Siegelkett. Kleben Sie dieses auf das vorgesehene Feld.

Besondere Hinweise

Sichtbare Verunreinigungen vor der Desinfektion entfernen. Die zu desinfizierende Fläche gründlich mit dem vorgetränkten Vliestuch abwischen und auf eine vollständige Benetzung achten. Nicht zur Desinfektion von invasiven Medizinprodukten geeignet. Bei allen getesteten schülke Produkten beträgt die Standzeit bis zu 28 Tage. Ausgetrocknete Tücher nicht mehr verwenden. Nach Tuchentnahme die Deckelöffnung wieder fest verschließen, um ein Austrocknen der Tücher zu vermeiden. Einwirkzeiten und etwaigen besonderen Anwendungshinweise für die sichere Anwendung sind der Gebrauchsanweisung der Desinfektionsmittel zu entnehmen. Weitere Wirksamkeiten entnehmen Sie bitte dem jeweils eingesetzten Desinfektionsmittel. Die Angaben des Herstellers der verwendeten Desinfektionspräparate zu Einwirkzeiten, Einsatzkonzentrationen und Hinweise zum Wirkspektrum sind zu beachten. Ausschließlich für die Verwendung von Fachkräften bestimmt. Schwerwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden. Nicht geeignet zur Abschlussdesinfektion von semikritischen und kritischen Medizinprodukten!

schülke wipes safe&easy

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	GTIN	PZN	Art.-Nr.
schülke wipes s&e bagless 130 ST EM	6 / Karton(e)	4032651981700	17604771	70003177

Anwendungshilfen

Artikel	Art.-Nr.
Wandhalterung schülke wipes Eimer	134430

Verwandte Produkte

- **antifect**® N liquid
- **buraton**® rapid
- **mikrozyd**® AF liquid
- **mikrozyd**® sensitive liquid
- **mikrozyd**® universal liquid
- **perform**® advanced alcohol EP
- **perform**® classic alcohol EP
- **perform**® classic concentrate Q-Plus
- **schülke wipes**®
- **terralin**® liquid
- **terralin**® protect

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Informationen

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.



Für individuelle Fragen:

Application Department

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.