

Peha-haft®

Allgemeine Produktbeschreibung/Zweckbestimmung

Peha-haft® ist eine kohäsive, elastische Fixierbinde zum Fixieren aller Arten von Primär- und Sekundärverbänden (wie Schienen, Gipsverbänden, Kathetern und Kanülen), insbesondere an Gelenken sowie an konischen und runden Körperteilen. Das Produkt wird weiterhin zur Stabilisierung von Muskeln, Sehnen, Bändern und Gelenken, wo eine schwache Immobilisationswirkung erforderlich ist, angewendet. Das Material setzt sich aus 43 % Viskose, 37 % Baumwolle und 20 % Polyamid zusammen. Das Produkt ist zum Einmalgebrauch vorgesehen und kann von medizinischen Fachkräften sowie unterwiesenen Laien auf intakter Haut in der klinischen und häuslichen Umgebung angewendet werden.

Anwendung/Indikation

Peha-haft® ist eine kohäsive, elastische Fixierbinde, die im Rahmen von medizinischen Interventionen, bei der kurz- oder langfristigen Versorgung von akuten oder chronischen Wunden sowie, wenn eine leichte Immobilisation in Kombination mit Medizinprodukten erforderlich ist, angewendet werden kann. Das Produkt eignet sich zur Fixierung von:

- Primär- und Sekundärverbänden
- Kanülen, Kathetern, Schläuchen und ähnlichen Medizinprodukten
- Schienen, Gipsverbänden und ähnlichen Medizinprodukten

Artikelnummern

REF	Name	Größe	Binden je Faltschachtel	Einzeln verpackt
932441	Peha-haft®	4cmx4m	1	Nein
932442	Peha-haft®	6cmx4m	1	Nein
932443	Peha-haft®	8cmx4m	1	Nein
932444	Peha-haft®	10cmx4m	1	Nein
932445	Peha-haft®	12cmx4m	1	Nein
932446	Peha-haft®	4cmx20m	1	Nein
932447	Peha-haft®	6cmx20m	1	Nein
932448	Peha-haft®	8cmx20m	1	Nein
932449	Peha-haft®	10cmx20m	1	Nein
932450	Peha-haft®	12cmx20m	1	Nein
932437	Peha-haft®	6cmx20m	6	Nein
932438	Peha-haft®	8cmx20m	6	Nein
932439	Peha-haft®	10cmx20m	6	Nein
932452	Peha-haft®	2,5cm x4m	8	Nein
932483	Peha-haft®RU	4cmx4m	1	Nein
932484	Peha-haft®RU	6cmx4m	1	Nein
932485	Peha-haft®RU	8cmx4m	1	Nein

Peha-haft®

932486	Peha-haft®RU	10cmx4m	1	Nein
300010	Peha-haft®RU	4cmx20m	1	Nein
300012	Peha-haft®RU	6cmx20m	1	Nein
300013	Peha-haft®RU	8cmx20m	1	Nein
300014	Peha-haft®RU	10cmx20m	1	Nein
300018	Peha-haft®RU	12cmx20m	1	Nein
300028	Peha-haft®DE	6cmx21m	1	Nein
300029	Peha-haft®DE	8cmx21m	1	Nein
300026	Peha-haft®DE	10cmx21m	1	Nein
300027	Peha-haft®DE	12cmx21m	1	Nein

Artikelnummern

Design Private Bezahlung

REF	Name	Größe	Binden je Faltschachtel	Einzel verpackt
928001	Peha-haft® DE,FR,NL,IT	6cmx4m	1	Nein
928002	Peha-haft® EN, PL, HR, SI	6cmx4m	1	Nein
928003	Peha-haft® EN, GR, BG, RO	6cmx4m	1	Nein
932710	Peha-haft® EN,ES,PT,IT	6cmx4m	1	Nein
928004	Peha-haft® DE,FR,NL,IT	8cmx4m	1	Nein
928005	Peha-haft® EN, PL, HR, SI	8cmx4m	1	Nein
928006	Peha-haft® EN, GR, BG, RO	8cmx4m	1	Nein
932711	Peha-haft® EN,ES,PT,IT	8cmx4m	1	Nein
932712	Peha-haft® EN,ES,PT,IT	10cmx4m	1	Nein

Restrisiken

Es wurden keine verbleibenden Restrisiken ermittelt.

Gegenanzeigen

Individuelle Unverträglichkeit.

Unerwünschte Nebenwirkungen

Nicht bekannt.

Peha-haft®

Produkt zum Einmalgebrauch

Die Wiederverwendung eines für den Einmalgebrauch vorgesehenen Medizinprodukts ist gefährlich. Die Wiederaufbereitung von Produkten, um sie erneut zu verwenden, kann ihre Integrität und Leistung deutlich beeinträchtigen. Weitere Informationen auf Anfrage.

Produktentsorgung

Um das Risiko potentieller Infektionsgefahren oder einer Umweltverschmutzung zu minimieren, sollten die Wegwerfkomponenten von Peha-haft® gemäß geltenden lokalen Gesetzen, Verordnungen, Vorschriften und Standards zur Infektionsprävention entsorgt werden.

Meldung von Vorkommnissen

Für Patienten/Anwender/Dritte in der Europäischen Union und in Ländern mit denselben Vorschriften (Verordnung [EU] 2017/745 über Medizinprodukte); wenn während oder infolge der Verwendung dieses Produktes ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, melden Sie dies dem Hersteller und/oder seinem Bevollmächtigten und Ihrer nationalen Behörde.

Leistungsmerkmale des Produkts

Eigenschaft	Anforderungen
Breite	2,5 cm; 4,0 cm; 6,0 cm; 8,0 cm; 10,0 cm; 12,0 cm
Gedehnte Länge	4 m; 20 m
Dehnung, MD	80 %
Kohäsionskraft	45 cN/cm
Abrollkraft	15-125 cN/cm
Flächengewicht (gedehnt)	39,5 g/m ²

Kennzeichnung

Fertigungslosnummer mit 9-stelligem Code

z. B.:

	9	999	01	XX	1
Erklärung	[9 = 2019]	[000-999]			
Definition	Jahr	Serielle Produktionsreihenfolge		Nur für interne Zwecke	

Herstellungsdatum

z. B.:		2015	04	07
		Jahr	Monat	Tag

Verwendbar bis

z. B.:		2018	04	07
		Jahr	Monat	Tag

Peha-haft®

Haltbarkeit: 3 Jahre

Medizinprodukt



Einmalige Produktkennung



CE-Kennzeichnung



Nicht wiederverwenden



Trocken aufbewahren



Vor Sonnenlicht schützen



Stand der Information: 2021-09-17