

# QuikClot® COMBAT GAUZE®

# QuikClot® COMBAT GAUZE®



## Vakuumverpackt und Z-gefaltet

Für die temporäre externe Anwendung zur Kontrolle traumatischer Blutungen

Ein (1) steriler, röntgenerkennbarer hämostatischer Verband, 7,5 cm x 3,7 m



Made in the USA

# QuikClot® COMBAT GAUZE®

### GEBRAUCHSANLEITUNG



1. Die Verpackung öffnen und die QuikClot Wundauflage entnehmen. Die leere Verpackung aufbewahren.



2. Die QuikClot Wundauflage auf die Wunde geben und unter Anwendung von manuellem Druck direkt auf der Blutungsstelle verwenden. (Bei Bedarf mehrere Wundauflagen verwenden.)



3. Mindestens 3 Minuten lang oder bis zum Stillen der Blutung Druck ausüben.



4. Einen Druckverband anlegen. Sofort ärztliche Hilfe aufsuchen. Die Anleitungen zum ENTFERNEN DES PRODUKTS auf der Verpackung dem medizinischen Personal zeigen.



EU Authorized  
Representative  
and Importer:

EC REP

Teleflex Medical  
IDA Business and  
Technology Park  
Dublin Rd. Athlone  
Co. Westmeath,  
Ireland

REF 289

ENTFERNEN DES PRODUKTS 1. Den Schwamm vorsichtig aus der Wunde nehmen. 2. Die Wunde ausreichend spülen.

Manufactured by:  
Z-Medica®, LLC  
4 Fairfield Boulevard  
Wallingford, CT 06492 USA  
Tel: 1.877.750.0504, +1.203.294.0000  
Fax: 1.800.343.8656, +1.203.303.7216  
QuikClot.com  
Patents: Z-Medica.com/patents.aspx  
© 2020 Z-Medica, LLC  
All rights reserved.  
Enthält Kaolin.  
101396-02 -WEB Rev D 2023-06



SBS

Sterilbarriersystem

STERILE R

MD Medizinprodukt

### ZUR ANWENDUNG DURCH GESCHULTE ERSTHELFER

VORSICHTSMAßNAHMEN: Nur zur externen Anwendung. Sterilität bei geöffneter oder beschädigter Verpackung nicht garantiert. Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei beschädigter Verpackung entsorgen. Eine Wiederverwendung wird ein Infektionsrisiko und einen Verlust der Wirksamkeit verursachen. Vor Hitze schützen. Vor Nässe schützen. Nicht resterilisieren.