



## Fix-Verbandschienen



Art. 2470000 Fix-Verbandschiene 15 x 3 cm  
Art. 2470001 Fix-Verbandschiene 20 x 3 cm  
Art. 2470002 Fix-Verbandschiene 25 x 3 cm  
Art. 2470003 Fix-Verbandschiene 30 x 3 cm  
Art. 2470004 Fix-Verbandschiene 40 x 3 cm

Art. 2470005 Fix-Verbandschiene 15 x 5 cm  
Art. 2470006 Fix-Verbandschiene 20 x 5 cm  
Art. 2470007 Fix-Verbandschiene 25 x 5 cm  
Art. 2470008 Fix-Verbandschiene 30 x 5 cm  
Art. 2470009 Fix-Verbandschiene 40 x 5 cm  
Art. 2470010 Fix-Verbandschiene 50 x 5 cm  
Art. 2470011 Fix-Verbandschiene 60 x 5 cm

Art. 2470012 Fix-Verbandschiene 30 x 7 cm  
Art. 2470013 Fix-Verbandschiene 40 x 7 cm  
Art. 2470014 Fix-Verbandschiene 50 x 7 cm  
Art. 2470015 Fix-Verbandschiene 60 x 7 cm  
Art. 2470016 Fix-Verbandschiene 70 x 7 cm  
Art. 2470017 Fix-Verbandschiene 80 x 7 cm

Art. 2470018 Fix-Verbandschiene 30 x 9 cm  
Art. 2470019 Fix-Verbandschiene 40 x 9 cm  
Art. 2470020 Fix-Verbandschiene 50 x 9 cm  
Art. 2470021 Fix-Verbandschiene 60 x 9 cm  
Art. 2470022 Fix-Verbandschiene 70 x 9 cm  
Art. 2470023 Fix-Verbandschiene 80 x 9 cm  
Art. 2470024 Fix-Verbandschiene 90 x 9 cm  
Art. 2470025 Fix-Verbandschiene 100 x 9 cm

Art. 2470026 Fix-Verbandschiene 40 x 11 cm  
Art. 2470027 Fix-Verbandschiene 50 x 11 cm  
Art. 2470028 Fix-Verbandschiene 60 x 11 cm  
Art. 2470029 Fix-Verbandschiene 70 x 11 cm  
Art. 2470030 Fix-Verbandschiene 80 x 11 cm  
Art. 2470031 Fix-Verbandschiene 90 x 11 cm  
Art. 2470032 Fix-Verbandschiene 100 x 11 cm  
Art. 2470033 Fix-Verbandschiene 120 x 11 cm

Art. 0845000 Unterarm-Fix-Verbandschiene 40 x 7 cm  
Art. 0845100 Unterarm-Fix-Verbandschiene 30 x 5 cm

Medizinprodukt der Klasse 1



## 1. Allgemeine Angaben / Zweckbestimmung / Indikation:

Fix-Verbandschienen werden zur Ruhigstellung, Lagerung und Unterstützung von verletzten Extremitäten (Arm – Hand – Fuß) oder nach operativen Eingriffen eingesetzt. Sie bestehen aus Schaumstoff mit integrierten Aluminiumeinlagen.

Die Unterarm-Fix-Verbandschiene (Art. 0845000 + 0845100) wird zur Fixierung des Arms bei Infusionen verwendet.

- Die Fix-Verbandschienen sind röntgenfähig.
- Vor Verschmutzung werden sie durch einen abwaschbaren Bezug geschützt.
- Durch die Aluminiumeinlage werden sie biegsam und lassen sich individuell an die entsprechende Extremität anpassen.
- Bevor der Stützverband angelegt wird, sollte die zu behandelnde Extremität mit einem Verband versorgt werden.

## 2. Sicherheitshinweise

- Handhabung und Benutzung der Produkte setzt die genaue Beachtung dieser Sicherheitshinweise voraus.
- Das Produkt ist nur für die in der Gebrauchsanleitung genannten Einsatzzwecke bestimmt. Jede andere Verwendung ist vom Hersteller nicht zulässig.
- Die Fix-Verbandschiene nie direkt auf nackter Haut und auf offene Wunden legen
- Es ist empfehlenswert die zu behandelnde Extremität vor Anlegen der Fix-Verbandschiene mit einem Verband zu versorgen.
- Bei anhaltenden Beschwerden oder Taubheitsgefühlen einen Arzt oder Fachpersonal aufsuchen.
- Bei gleichzeitige Nutzung anderer Produkte Rücksprache halten mit einem Arzt.
- Das Produkt ist nur für die Versorgung **eines Patienten** ausgelegt; an diesem kann es mehrfach verwendet werden.
- Die Fix-Verbandschienen sind regelmäßig vor jeder Benutzung per Sichtkontakt auf Materialunversehrtheit (Bruchstellen oder Unebenheiten an der Oberfläche) zu prüfen, um mögliche Verletzungsgefahren auszuschließen
- Der Hersteller ist für die Sicherheit und Funktion des Produkts nur dann verantwortlich, wenn die Zweckbestimmung eingehalten wird und nur eigens für dieses Produkt vorgesehenes Zubehör verwendet wird.

## 3. Reinigung und Desinfektion:

Die Reinigung kann mit milden, ph-neutralen krankenhauses- und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln vorgenommen werden.

Die anschließende Desinfektion kann ebenfalls mit einfachen handelsüblichen Desinfektionsmitteln erfolgen.

## 4. Wartung und Pflege:

Keine Besonderheiten, außer auf die Unversehrtheit des Materials (z.B. Unebenheiten, raue Kanten, Bruchstellen) achten. Sobald grobe Verschleißerscheinungen oder Schäden zu erkennen sind, muss die Fix-Verbandschiene ausgetauscht werden.

Das Produkt sollte bei Raumtemperatur gelagert werden.  
Große Hitzeeinwirkungen und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden.

## 5. Entsorgung

Die Fix-Verbandschiene (Schaumstoff mit Aluminiumeinlage) wird über den Hausmüll / Restmüll entsorgt werden.

**Dr. Paul Koch GmbH**, Im Geiselrain 7, D-72636 Frickenhausen, Tel: +49 (0) 7022 / 40595 – 0;  
www.dr-koch.de, [info@dr-koch.de](mailto:info@dr-koch.de)