

DATENBLATT**SterilancePress II Sicherheitslanzette**

Art.-Nr.: A2 3941



Für die sichere und fast schmerzfreie Blutentnahme.

- Nadel ist vor und nach der Anwendung komplett geschützt
- Vorgespannt, durch Druck auslösend
- Sorgt jederzeit für einwandfreie Blutproben
- Hochwertige, ultrascharfe und dreifachangeschrägte Nadel oder zweifachangeschrägte Klinge
- Hohe Einstichgeschwindigkeit
- Verschiedene Spitzenkonfigurationen und Einstichtiefen ermöglichen die gängigsten Kapillarblutabnahmen
- Für Blutzucker- und andere diagnostische In-vitro-Tests

Anleitung:

Schutzkappe vorsichtig abdrehen. Einstichstelle wählen und zum Auslösen der Lanzette das Gerät fest gegen diese pressen. Sicherheitslanzette in einem geeigneten Sicherheitsbehälter, wie z. B. die Servobox entsorgen.

Lagerfähigkeit: 5 Jahre.

Warnhinweis:

Sollte die Schutzkappe bereits bei Entnahme aus dem Karton fehlen, bitte die Lanzette nicht mehr benutzen!

DATENBLATT

SterilancePress II Sicherheitslanzette

Art.-Nr.: A2 3941

Typ	Fuer	Gauge	Farbe	REF	VE
Klinge, Einstichtiefe: 1,8 mm	Babies, für Fersenb lutentnahme, neonatal und Neugeborene	18 G	grün	A2 3931	100 Stück
Nadel, Einstichtiefe: 1,8 mm	Diabeteskliniken und Krankenhäusern zur Blutglucose- Untersuchung	26 G	gelb	A2 3941	100 Stück
Nadel, Einstichtiefe: 2,2 mm	allgemeine Blutuntersuchunge n, bei Erwachsenen mit normaler Haut	21 G	orange	A2 3951	100 Stück
Nadel, Einstichtiefe: 2,8 mm	allgemeine Blutuntersuchunge n, bei Erwachsenen mit dickerer Haut	21 G	pink	A2 3961	100 Stück
Nadel, Einstichtiefe: 1,8 mm	wie gelb, aber für höheren Blutfluss	21 G	blau	A2 3972	100 Stück
Nadel, Einstichtiefe: 1,8 mm	geringeren Blutfluss	28 G	lila	A2 3982	100 Stück
Nadel, Einstichtiefe: 1,8 mm	geringeren Blutfluss und weniger Schmerzen	30 G	türkis	A2 3992	100 Stück

Artikel	REF	Menge	Einzelpreis	Gesamtbetrag

zzgl. gesetzl. MwSt.

Persönliche Angabe:

Kundennummer: _____

Firma: _____

Vorname: Nachname: _____

E-Mail: _____

Straße, Hausnummer: _____

PLZ, Ort: _____

Hiermit bestelle ich verbindlich:

Stempel / Adresse

Datum / Unterschrift

Sie bestellen zu unseren AGBs, unsere gültigen AGBs finden Sie unter <https://www.servoprax.de/agb/>