

# FFP2 AIR

Filtrierende Halbmaske




- Die FFP2 Air-Maske vereint den niedrigen Atemwegswiderstand einer medizinischen Maske und die hohe Filterleistung<sup>1)</sup> einer FFP2-Maske.
- Bei der Verwendung einer gut sitzenden FFP2 Maske kann das Infektionsrisiko von 10 % auf 0,1 % im Vergleich zur medizinischen Maske gesenkt werden<sup>2)</sup>
- Höchster Tragekomfort und optimale Passform für jede Gesichtsform
- Gute Hautverträglichkeit
- Einzeln verpackt
- Mikrobiologisch sauber
- EN 14683:2019-10 in Bezug auf Typ I, II, IIR
- BS2 A FFP2 NR. EN 149:2001+A1:2009

#### Quellen:

1) Filterung von  $\geq 94\%$  der Testaerosole (EN-DIN 149:2001+A1:2009)

2) <https://www.pnas.org/doi/pdf/10.1073/pnas.2110117118>

## Handhabung der filtrierenden Halbmaske

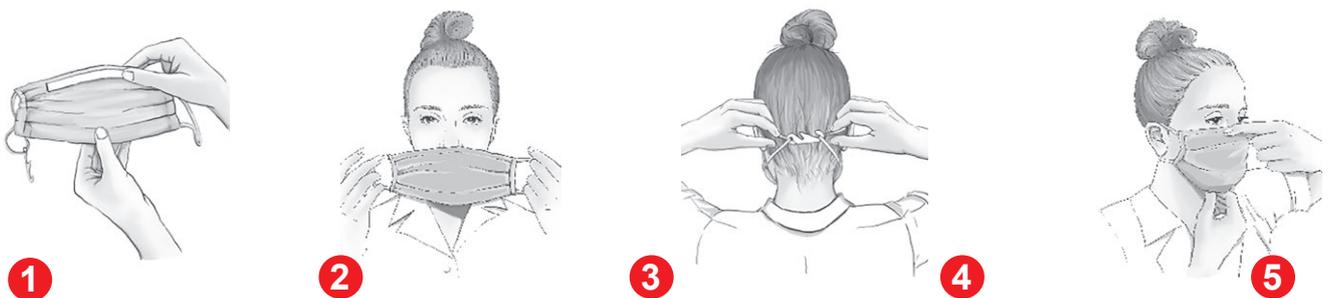

1. Nehmen Sie die Halbmaske aus der Verpackung und prüfen Sie ihren Zustand.
2. Breiten Sie die Halbmaske aus, indem Sie diese sanft auf Ihr Gesicht aufsetzen.
3. Wenn die Kopfbänder zu lang sind, können Sie die Bänder kürzen oder kreuzen.
4. Legen Sie die Kopfbänder an und verbinden Sie die Bänder mit der Spange am Hinterkopf.
5. Passen Sie die Halbmaske an Ihr Gesicht an, indem Sie den Nasenclip und den dünnen Draht an der Unterseite der Halbmaske zusammendrücken oder im Falle eines eingenähten Gummibandes festziehen, um die Unterkante an Ihr Gesicht anzupassen.


# FFP2 AIR

Filtrierende Halbmaske

## 20er-Box



## Karton

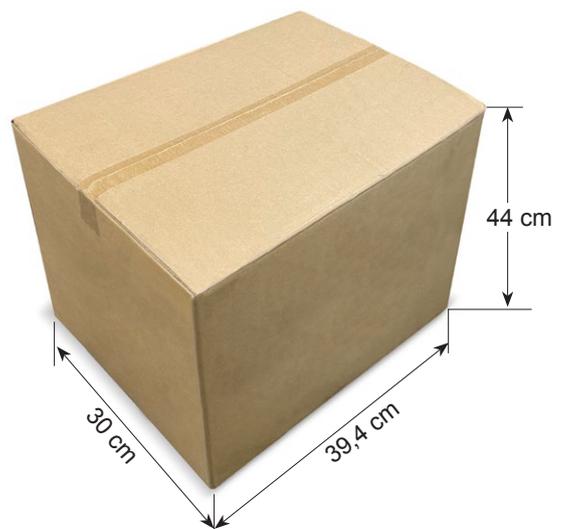

### Hersteller:

BISAF sp. z o.o.  
ul. Rdestowa 5  
54-530 Wrocław  
Tel. +48 503 411 527  
E-Mail 24H@bisaf.pl



Gebrauchsanweisung  
sorgfältig lesen




Verwendbarkeit 60 Monate  
ab Herstellungsdatum  
(Datum auf der Verpackung)



Lagerungsfeuchtigkeit  
Unter 80 %



Vor Sonnenlicht schützen

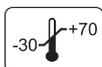

Lagerungstemperatur  
zwischen -30°C und +70°C



Medizinprodukt



**Verpackungseinheit (Mindestbestellmenge 1 Karton = 16 Boxen/320 Masken).**

Artikel		Box		Karton		
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge x Breite x Höhe (cm)	Masken	Länge x Breite x Höhe (cm)	Boxen pro Karton	Bruttogewicht pro Karton
1110	BS2 A FFP2 NR. Maske weiß, genäht	21,7 x 14 x 9,3	20	39,4 x 30 x 44	16	4,25 kg

