

S

SCHNITZLER

Rettungsprodukte GmbH & Co. KG



Gebrauchsanweisung KOPFKISSEN

mit Adaption für
für alle Tragentypen in den Ausführungen:

- **Thermo-Visco-Kopfkissen**
- **Vakuum-Kopfkissen**
- **Kopfkissen, keilförmig**

Kopfkissen

REF

Art.-Nr.	Füllung	Stollenwerk	Stryker	Ferno	Kartsana	Form	Gewicht
006 TV	Thermo-Visko	● ● ●	● ●	● ●	● ●	muldenförmig	740 g
006 VS	Granulat+ Vakuumpfunktion	●	●	●	●	muldenförmig	600 g
007 S	Schaumstoff	●	●	●	●	keilförmig	300 g

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Kopfkissen, das unterstützend zur Erhöhung des Liegekomforts, beim Patiententransport im Rettungsdienst und Krankentransport eingesetzt wird. Das Produkt ist mit unterschiedlichen Füllmaterialien erhältlich. Das Produkt ist verfügbar in einer Mulden- oder Keilform. Das Produkt kann auf Tragen der Firmen Stollenwerk, Kartsana, Ferno und Stryker eingesetzt werden. Zur Befestigung auf der Tragenauflage ist in Abhängigkeit des verwendeten Tragentyps eine entsprechende Adaption zu ergänzen.

Hersteller des Produkts ist die Firma Schnitzler Rettungsprodukte GmbH & Co. KG.

Für einen ordnungsgemäßen Gebrauch ist die vorliegende Gebrauchsanweisung zu beachten.

Reinigungs- und Desinfektionshinweise

- Bei leichten Verschmutzungen des Kopfkissens wird zur Reinigung die Verwendung einer einfachen Seifenlösung empfohlen.
- Für eine spezielle Desinfektion nur handelsübliche Desinfektionsmittel verwenden. Vom Hersteller als unbedenklich eingestuft werden:
Dismozon plus, Bacillol 30, Kohrsolin extra, Mikrobac forte.
- Kein Wasserstoffperoxid (H₂O₂) verwenden
- Desinfektionsmittel nur gemäß den Vorgaben des jeweiligen Herstellers verwenden. Bei Überdosierung wird keine Haftung für Schäden am Material übernommen.

Montage- und Wartungshinweise:

- Die Montage aller gelieferten Komponenten darf nur gem. der vorliegenden Gebrauchsanweisung erfolgen.
- Bei erkennbaren Beschädigungen des Kopfkissens darf dieses nicht weiterverwendet werden.** Vor einem weiteren Einsatz muss dieses instand gesetzt werden. Zur Reparatur und ordnungsgemäßen Instandsetzung muss dieses zu uns gesendet werden.
- Keine der Komponenten darf durch spitze oder scharfkantige Gegenstände beschädigt werden.
- Das Produkt ist zum Wiedereinsatz geeignet. Nach Beendigung eines Einsatzes ist das Produkt zu pflegen (siehe Abschnitt Reinigungs- und Desinfektionshinweise) und auf äußerlich erkennbare Schäden zu kontrollieren. Weist das System keine Beschädigungen auf, ist es zum Wiedereinsatz bereit.

Bestehende Anwendungsrisiken und Kontraindikationen:

Es sind keine bestehenden Anwendungsrisiken oder Kontraindikationen bei Einhaltung der Hinweise aus der Gebrauchsanweisung bekannt.

Zulässige Einsatzorte:

Das Produkt kann zur Erhöhung des Liegekomforts beim Patiententransport im Rettungsdienst und Krankentransports eingesetzt werden.



Montageanleitung der Befestigungsadaptionen für unterschiedliche Tragentypen

auf Stollenwerk- und Ferno-Tragen:



Variante 1:

- **abklappbare Adaption** auf Kopfteilverlängerung ankletten und Kopfkissen auflegen

Variante 2:

- Bei Nichtverwendung der abklappbaren Adaption: beigelegtes Flauschband als Adaption zur Kopfteilverlängerung nutzen

auf Kartsana-Tragen:



Variante 1:

- **abklappbare Adaption** auf Kopfteilverlängerung ankletten. Kopfkissen über Druckknopfverbindung an Adaption befestigen



Variante 2:

- **Bei Nichtverwendung der abklappbaren Adaption:** Adaptionshülle auf Kopfteilverlängerung aufziehen und Kopfkissen auflegen



auf Stryker-Tragen:



- Adaptionshülle auf Stryker-Kopfteilverlängerung aufziehen



- Kopfkissen auf Adaption auflegen

Anwendungshinweise für Vakuum-Kopfkissen



- Patient auflegen
- Vakuum-Kopfkissen bei geöffnetem Ventil anmodellieren
- Absauggerät an Ventil anschließen und Luft absaugen
- Ventil schließen und Absauggerät entfernen

Wichtiger Anwendungshinweis!

Nach dem Patiententransport das Ventil öffnen, so dass die Luft aus dem Kopfkissen entweichen kann. Somit wird ein Druckaufbau, der ein unerwünschtes Reißen der Schweißnähte bewirken kann, verhindert.

