

Injektionskissen



Art. 0850000 Injektionskissen mit PVC-Bezug, elfenbeinweiß, 45x15 cm

Art. 0850001 Injektionskissen mit PVC-Bezug, elfenbeinweiß, 30x15 cm

Art. 0850121 Injektionskissen mit PVC-Bezug, dunkelblau, 45x15 cm

Art. 0850123 Injektionskissen mit PVC-Bezug, dunkelblau, 45x15 cm

Medizinprodukt der Klasse 1 

1. Allgemeine Angaben / Zweckbestimmung / Indikation:

- Die Injektionskissen dienen der Auflage, Ruhigstellung und der Unterstützung des Patientenarms während einer Infusion oder einer Blutabnahme.
- Die Anwendung erfolgt von Fachpersonal.

2. Sicherheitshinweise

- Handhabung und Benutzung des Produkts setzt die genaue Beachtung dieser Sicherheitshinweise voraus.
- Das Produkt ist nur für die in der Gebrauchsanleitung genannten Einsatzzwecke bestimmt. Jede andere Verwendung ist vom Hersteller nicht zulässig.
- Vor jeder Benutzung per Sichtkontrolle auf Materialunversehrtheit (Bruchstellen oder Unebenheiten an der Oberfläche) untersuchen, um mögliche Verletzungsgefahren auszuschließen.
- Sollte das Produkt erhebliche Gebrauchs- und Verschleißerscheinungen zeigen, sollte es ersetzt werden.

- Der Hersteller ist für die Sicherheit und Funktion des Produkts nur dann verantwortlich, wenn die Zweckbestimmung eingehalten wird.

3. Reinigung und Desinfektion:

Die Injektionskissen aus PVC können mit milden, ph-neutralen krankenhaushaus- und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Die anschließende Desinfektion kann ebenfalls mit einfachen handelsüblichen Desinfektionsmitteln erfolgen.

Nach dem Auftragen des Desinfektionsmittels auf die Lagerungshilfe ist diese gleich trockenzureiben.

Die Desinfektionsmittel sind gemäß dem jeweiligen Gebrauchshinweis zu verwenden.

empfohlen Desinfektionsmittel:

Hersteller:	Mittel:
Dr. Schumacher	Descosept forte / Descosept sensitive Wipes / Cleanisept Wipes Maxi
Bode Chemie GmbH	Microbac forte
B. Braun Melsungen	Hexaquart
Franken Chemie	Franko-Cid N

4. Wartung und Pflege:

Keine Besonderheiten, außer auf die Unversehrtheit des Materials (z.B. Unebenheiten, raue Kanten) achten

Die Lagerung sollte bei Raumtemperatur erfolgen.

Direkte Sonneneinstrahlung und große Hitzeeinwirkungen sind zu vermeiden.

5. Entsorgung

Schaumstoffprodukte werden über den Hausmüll / Restmüll entsorgt werden. Bitte die Vorschriften vor Ort beachten.

Dr. Paul Koch GmbH, Im Geiselrain 7, D-72636 Frickenhausen, Tel: +49 (0) 7022 / 40595 – 0;
www.dr-koch.de, info@dr-koch.de