

## **Kältesofortkomresse**

### **Anwendungsbereiche:**

Kältesofortkompressen sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt und können in folgenden Anwendungsbereichen der Sofort-Behandlung eingesetzt werden:

- Sportverletzungen
- Physiotherapie
- Sportmedizin
- Orthopädie
- Gynäkologie
- Zahnmedizin
- Postoperative Therapie

### **Hinweise:**

Für schnelle Kühlung bei stumpfen Verletzungen, zur Vermeidung und Reduzierung von Schwellungen und zur Schmerzlinderung. Inneren Flüssigkeitsbeutel fassen und zum Platzen bringen. Beutel kräftig schütteln.

**Nur zur äußeren Anwendung.**

**Nicht auf offene Wunden legen.**

**Nicht länger als 20 Minuten anwenden.**

**Immer in ein dünnes Tuch einschlagen.**

**Vor Kindern sicher aufbewahren.**

Sollte die Lösung mit Augen Haut oder offener Wunde in Berührung kommen, sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen und im Zweifel Arzt oder Apotheker konsultieren. Kühl und trocken, nicht unter 0 °C, vor Sonnen geschützt nicht über 45 °C lagern.

Komresse darf nicht bei Durchblutungsstörungen und Kälteüberempfindlichkeit, Raynaud-Syndrom angewendet werden.

Anwendung bei Herz-, Kreislauferkrankung und Diabetes mellitus nur nach Rücksprache mit dem Arzt.

Bitte melden Sie alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle der Gello GmbH Geltechnik und der zuständigen Behörde.

### **Rev. 03/2020**

GELLO® GmbH Geltechnik  
Harmate 28  
48683 Ahaus

Tel: +49 2561/9802-0  
info@gello.de