

ARROW™

Arrow™ EZ-IO™


Kurzanleitung
Pädiatrische
Anwendung



Teleflex™
Empowering the future of healthcare


1. Identifizierung

Punktionsort identifizieren

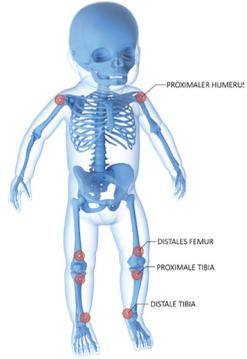

2. Landmarken

Landmarke des Punktionsorts

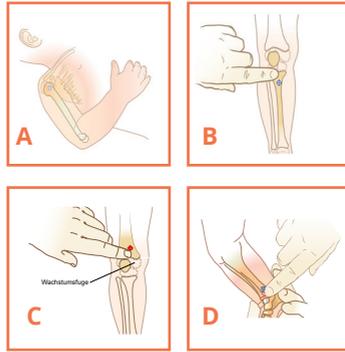


- A. Proximaler Humerus
- B. Proximale Tibia
- C. Distaler Femur
- D. Distale Tibia


3. Bewerten

Hautdicke bewerten

Untersuchen Sie die Einführungsstelle, um die ungefähre Gewebetiefe zu ermitteln.

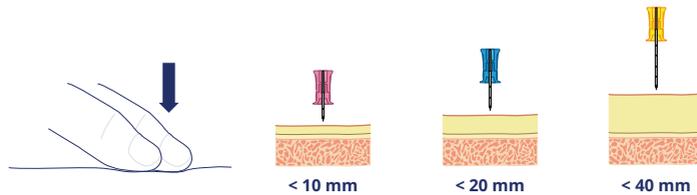

4. EZ-IO™ Nadel bestätigen und einführen

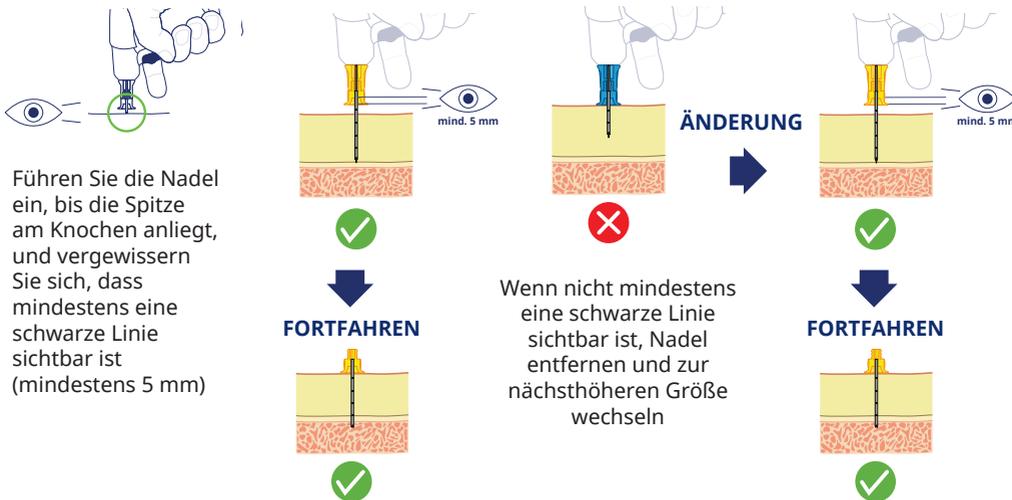


Führen Sie die Nadel ein, bis die Spitze am Knochen anliegt, und vergewissern Sie sich, dass mindestens eine schwarze Linie sichtbar ist (mindestens 5 mm)

Wenn nicht mindestens eine schwarze Linie sichtbar ist, Nadel entfernen und zur nächsthöheren Größe wechseln

5. EZ-IO™ Bohrer einsetzen

Den Auslöser drücken und sanft einen stetigen Druck ausüben.

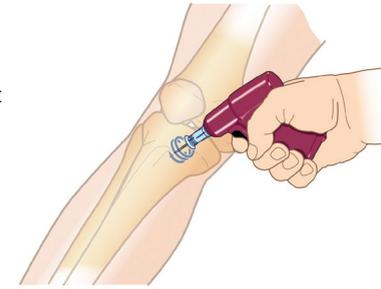

6. Sicher



Anschluss stabilisieren und Bohrer sowie Mandrin entfernen.

Mandrin in roten NeedleVISE für spitze/scharfe Gegenstände ablegen.

EZ-Stabilizer-Pflaster auf dem Katheteranschluss anbringen.


Vorgefüllte EZ-Connect™ Anschlussleitung anbringen und Folie von der Rückseite des EZ-Stabilizer™ Pflasters abziehen und Pflaster auf die Haut aufbringen.

7. Verabreichung

Einstellen und Bolus mit Kochsalzlösung (2-5 ml für Kleinkinder/Kinder)



Flüssigkeiten und Medikamente verabreichen. Für optimalen Durchfluss mit Druck infundieren.

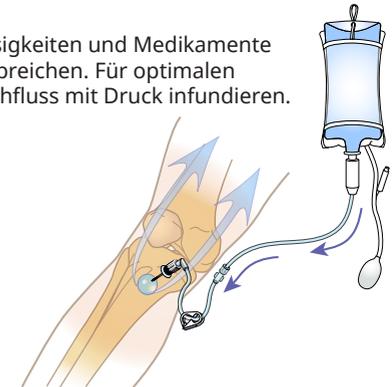

Über Teleflex

Als weltweiter Anbieter von medizintechnischen Produkten möchte Teleflex dazu beitragen, die Gesundheit und Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Durch unsere Vision, zum zuverlässigsten Partner im Gesundheitswesen zu werden, bieten wir ein vielseitiges Portfolio mit Lösungen in den Therapiebereichen Anästhesie, Notfallmedizin, interventionelle Kardiologie und Radiologie, Chirurgie, Gefäßzugang und Urologie. Wir sind überzeugt, dass großartige Mitarbeiter:innen und Spitzenprodukte die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten können.

Zur Teleflex-Familie gehören Arrow™, Barrigel™, Deknatel™, QuikClot™, LMA™, Pilling™, Rüschi™, UroLift™ und Weck™ – renommierte Marken, vereint durch ein gemeinsames Ziel.

Wir bei Teleflex gestalten die Zukunft des Gesundheitswesens. Weitere Informationen erhalten Sie unter [teleflex.com](https://www.teleflex.com).

Zentrale

Telefon +1 610 225 6800, 550 E. Swedesford Road, Suite 400, Wayne, PA 19087, USA

Regionale Niederlassungen

USA: Telefon +1 919 544 8000, gebührenfreie Rufnummer 866 246 6990, cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, USA

Lateinamerika: Telefon +1 919 433 4999, la.cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, USA

International: Telefon +353 (0)9 06 46 08 00, orders.intl@teleflex.com, Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park, Dublin Road, Athlone, Co Westmeath, Irland

Teleflex, das Teleflex-Logo, Arrow und Arrow EZ-IO sind eingetragene Marken von Teleflex Incorporated oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern.

Die Informationen in diesem Dokument sind kein Ersatz für die Gebrauchsanweisung des Produkts. Produktverfügbarkeit je nach Land unterschiedlich. Bitte wenden Sie sich an Ihre Kundenbetreuung vor Ort. Stand der Informationen: 09/2024.

© 2024 Teleflex Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.

MCI-2024-1044-DE · REV 0 · 09 24 PDF