

BD Vacutainer® Safety-Lok™ Sicherheitspunktionsbesteck für Blutentnahme und Kurzzeitinfusionen



Helping all people
live healthy lives



BD Vacutainer® Safety-Lok™ Sicherheitspunktionsbesteck

... für Blutentnahme sowie Kurzzeitinfusion bis zu zwei Stunden

Dieses neue Produkt bietet Ihnen folgende Vorteile:

- Höchster Anwenderkomfort**
 Die hohe Elastizität der Flügel bietet optimale Griffigkeit und Halt bei der Punktionsstelle.
- Weniger Schmerzempfinden beim Patienten**
 Die Kanüle ist aufgrund eines optimalen Kanülenschliffs, spezieller Poliertechnologie und patentierter Beschichtung besonders gleitfähig. Dies ermöglicht ein leichtes Eindringen in die Haut.
- Keine gesundheitsgefährdenden Inhaltsstoffe**
 Das Schlauchmaterial enthält kein DEHP und ist selbstverständlich latexfrei.
- Schutz vor Nadelstichverletzungen**
 Das neue Sicherheitspunktionsbesteck hat einen integrierten Kanülenschutz, der einhändig aktiviert werden kann. Das Produkt erfüllt alle Anforderungen an ein Sicherheitsprodukt entsprechend den Richtlinien der TRBA 250.
- Leichtere Handhabung**
 Die plastischen Eigenschaften des Schlauches wurden so verändert, dass er sich nicht mehr sprungfederartig einwickelt.

Produktinformation


Artikelnummer	Farbcode	Kanüle	Schlauchlänge
367246	grün	21G, 0,8mm x 19mm	30 cm
367247	hellblau	23G, 0,6mm x 19mm	30 cm
368383	dunkelblau	25G, 0,5mm x 19mm	30 cm



BD Safety-Lok Sicherheitspunktionsbesteck ohne Luer-Adapter

Empfohlene Handhabung:


Führen Sie die Punktionsstelle wie gewohnt durch. Decken Sie die Punktionsstelle mit einem sterilen Tupfer ab. Ziehen Sie das Besteck aus der Vene und komprimieren Sie die Punktionsstelle. Den Sicherheitsmechanismus aktivieren Sie wie folgt:

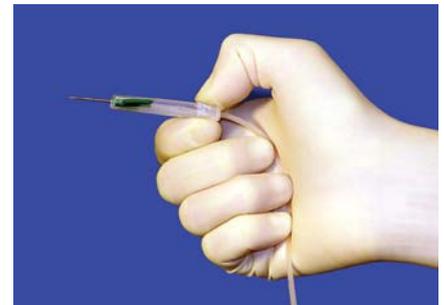

Halten Sie das Besteck zwischen Daumen und Zeigefinger an der Grifffläche des Sicherheitsmechanismus. Fixieren Sie gleichzeitig den Schlauch mit Mittel-, Ring- und kleinem Finger in der Handinnenfläche.



Halten Sie den Schlauch gespannt, und schieben Sie den Kanülenschutz über die Kanüle.

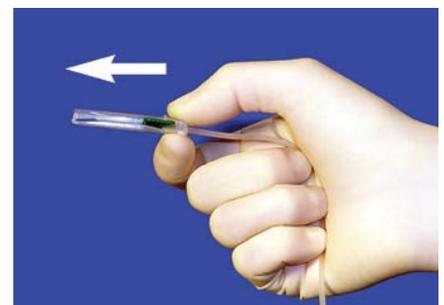

Nach dem vollständigen Vorschieben rastet die Kanülenschutzhülse fühl- und hörbar irreversibel über der Kanüle ein. Entsorgen Sie das Besteck in einem geeigneten Kanülenabwurfbehälter entsprechend den Vorschriften Ihres Hauses.