

Plum Augenspülwandbox

Augenspülwandbox mit 2 x 500 ml Plum Augenspüllösung

Bei einem Unfall können wenige Sekunden darüber entscheiden, ob das Augenlicht beeinträchtigt wird. Daher ist der schnelle Zugang zu einer Augenspüllösung wichtig – an allen Arbeitsplätzen, an denen ein Risiko für Augenverletzungen besteht.

Vorteile

- Wirksame und flexible Spüllösungen
- Einfache und schnelle Anwendung
- Ungeöffnet drei Jahre haltbar
- Flaschen entsprechen der DIN EN 15154-4
- Keine Wartung und Reinigung der Flaschen erforderlich



Verpackung/Versandeinheit

Art.-Nr. 4650 – 1 Stück

Inhalt

Wandbox aus Polystyrol mit 2 x 500 ml steriler Plum Augenspüllösung (0,9 % Natriumchloridlösung), separate Piktogrammtafel mit Spiegel, Befestigungsmaterial

Einsatzbereich

Entfernen bzw. Ausspülen von Fremdkörpern bei mechanischen Verletzungen, z.B. durch Metall- und Holzsplitter, Schmutz, Staub. Die Wandbox schützt die Flaschen sicher vor Staub und Schmutz.

Maße

Wandbox ca. H 280 x B 230 x T 110 mm; Piktogrammtafel ca. H 290 x B 230 mm

Anwendung



Nehmen Sie die Flasche aus der Halterung.



Drehen Sie die Augenschale bis die Versiegelung bricht.



Den Kopf zurücklehnen, Flasche leicht zusammendrücken und spülen bis die Flasche entleert ist.

Hinweise zur Handhabung

Produkt zur einmaligen Benutzung. Nach Ablauf des Verfalldatums (s. Flaschenetikett) nicht mehr einsetzen. Die Versiegelung der Flaschen muss unversehrt sein, um eine einwandfreie Handhabung zu gewährleisten. Bei Wiederverwendung von angebrochenen Flaschen besteht ein Infektionsrisiko.

