

Plum Kombi-Box

Augenspülwandbox mit 200 ml pH Neutral und 500 ml Plum Augenspüllösung

Bei einem Unfall können wenige Sekunden darüber entscheiden, ob das Augenlicht beeinträchtigt wird. Daher ist der schnelle Zugang zu einer Augenspüllösung wichtig – an allen Arbeitsplätzen, an denen ein Risiko für Augenverletzungen besteht.

Vorteile

- Wirksame und flexible Spüllösungen
- Einfache und schnelle Anwendung
- Ungeöffnet drei Jahre haltbar
- Flaschen entsprechen der DIN EN 15154-4
- Keine Wartung und Reinigung der Flaschen erforderlich

Verpackung/Versandeinheit

Art.-Nr. 4789 – 1 Stück

Inhalt

Wandbox aus Polystyrol mit 1 x 200 ml pH Neutral (sterile 4,9 % Phosphatpufferlösung) + 1 x 500 ml sterile Plum Augenspüllösung (0,9 % Natriumchloridlösung), separate Piktogrammtafel, Befestigungsmaterial

Einsatzbereich

Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren oder Alkali sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können. Die Wandbox schützt die Flaschen sicher vor Staub und Schmutz.

Maße

Wandbox ca. H 280 x B 230 x T 110 mm; Piktogrammtafel ca. H 290 x B 230 mm

Anwendung



Nehmen Sie die Flasche aus der Halterung.



Drehen Sie die Augenschale bis die Versiegelung bricht.



Den Kopf zurücklehnen, Flasche leicht zusammendrücken und spülen bis die Flasche entleert

Hinweise zur Handhabung

Produkt zur einmaligen Benutzung. Nach Ablauf des Verfalldatums (s. Flaschenetikett) nicht mehr einsetzen. Die Versiegelung der Flaschen muss unversehrt sein, um eine einwandfreie Handhabung zu gewährleisten. Bei Wiederverwendung von angebrochenen Flaschen besteht ein Infektionsrisiko.

