


# Sicheres Umstecken einer Infusionsflasche


**1. Entfernen Sie den Schutz der Flasche und desinfizieren Sie die Oberfläche des Stopfens gemäß dem im Krankenhaus geltenden Verfahren.**

**2. Entfernen Sie den Schutz des Dorns.**

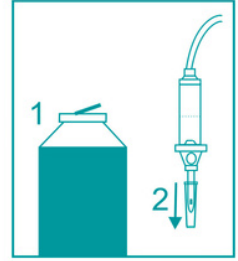


**3. Stellen Sie die Flasche senkrecht hin und durchstechen Sie den Stopfen mit dem Dorn des Infusionsgeräts bis zum Anschlag.**

**4. Drehen Sie das Rädchen zu. Lufteinlass geschlossen.**

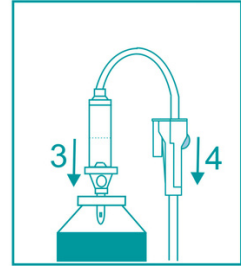


**5. Hängen Sie die Flasche an den Infusionsständer.**

**6. Drücken Sie die Tropfkammer, um sie bis zur Hälfte zu füllen. Lufteinlass und Regler**

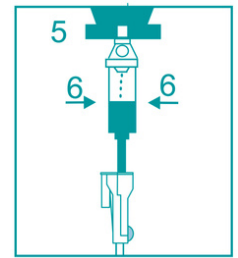

**7. Öffnen Sie das Rädchen der Rollklemme**


**8. Öffnen Sie den Lufteinlass, was das Abfließen der Lösung ermöglicht und spülen Sie die Leitung, ohne den Endstopfen zu entfernen, der den Sterilschutz darstellt. Dieser Stopfen ermöglicht die Luftentweichung und verhindert dabei das Austreten von Lösung.**

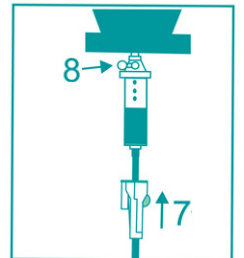

**9. Schließen Sie das Rädchen des Durchflussreglers.**

**10. Entfernen Sie den Stopfen und verbinden Sie das Infusionsgerät sofort mit dem Zugang, wobei die Regeln der Asepsis beachtet werden.**

**11. Stellen Sie die Durchflussrate ein und kontrollieren Sie diese, indem Sie das Rädchen öffnen und die Tropfen in der Tropfkammer zählen (1 mL = 20 Tropfen).**

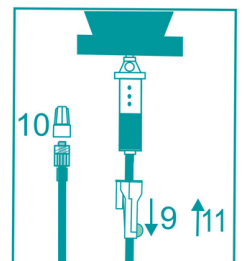

**Überprüfen Sie die Durchflussrate durch Zählen der Tropfen 15 Minuten nach Beginn der Infusion sowie das abgegebene Volumen.**