

# PERFUSOR® SPACE PCA LOCKBOX PRODUKTINFORMATION

Mit der Perfusor® Space PCA Lockbox steht Ihnen ab sofort ein neues Zubehör für Ihre PCA Therapie zur Verfügung.



## EIGENSCHAFTEN

- Robuste Verschlussbox aus klarem, durchsichtigen Polycarbonat
- Leicht, kompakt und mit integriertem Tragegriff
- Geeignet für Infusionsstände und Rohsysteme bis 35 mm Durchmesser. Kann nicht an Schienensystemen verwendet werden
- Verschiebbare Frontklappe und abschließbare Halterung
- Vollständiger Schutz eines Perfusor® Space mit ausreichend Platz für die uneingeschränkte Funktionsfähigkeit des Spritzenantriebes
- Mit integriertem Fenster für die leichte Bedienung und Programmierung des Perfusor® Space
- Mit Anschlussmöglichkeit für den PCA Taster
- Einfach mit den für die B. Braun Space Infusionstechnik üblichen Desinfektionsmitteln zu desinfizieren

## BESTELLDATEN

Bezeichnung	Maße (L x T x H)	Verkaufseinheit	Artikelnummer
Perfusor® Space PCA Lockbox	39 cm x 19 cm x 14,5 cm	1	8713557
Ersatzschlüssel für PCA Lockbox	-	2	8713334

# PERFUSOR® SPACE PCA LOCKBOX

## ANWENDUNGSHINWEIS



### BEFESTIGUNG DER LOCKBOX

1. Öffnen Sie mit dem Schlüssel die Verriegelung an der Befestigungsklemme.
2. Befestigen Sie die Lockbox am Infusionsständer / Stativ.  
(Einsetzbar an Rohsystemen bis 35 mm Durchmesser).
3. Verschießen Sie die Verriegelung. Sie verhindern so ein ungewolltes Entfernen der Lockbox und schützen gleichzeitig den Verschlussriegel vor ungewollter Beschädigung.



### EINLEGEN UND BEDIENEN DES PERFUSOR® SPACE

4. Öffnen Sie mit dem Schlüssel die Frontklappe der Lockbox.
5. Schieben Sie den Perfusor® Space in die Lockbox bis er hörbar einrastet.
6. Legen Sie den Einmalartikel ein und bereiten Sie die Applikation wie gewohnt vor. Sie können alternativ den Perfusor® Space auch schon vorher mit dem Einmalartikel bestücken.
7. Schließen Sie die Frontklappe und verschließen Sie die Verriegelung.
8. Der Perfusor® Space kann durch das Fenster wie gewohnt bedient werden.



### ENTFERNEN DES PERFUSOR® SPACE

9. Nach Beendigung der Therapie stoppen Sie den Perfusor® Space durch das Bedienfenster der Lockbox.
10. Öffnen Sie mit dem Schlüssel die Frontklappe und entfernen Sie den Einmalartikel, nachdem die Patientenverbindung unterbrochen wurde (siehe GBA Perfusor® Space).
11. Zur Entnahme des Perfusor® Space aus der Lockbox drücken Sie auf den grünen Verschlussknopf des Perfusor® Space außen an der Lockbox und ziehen die Spritzenpumpe langsam zu sich.



### REINIGUNG UND DESINFEKTION

12. Zur Reinigung und Desinfektion sind die für die Infusionstechnik Space üblichen Desinfektionsmitteln z. B. Meliseptol® zugelassen.
13. Flächen großzügig mit einem weichen fusselfreien Tuch reinigen bzw. mit Desinfektionstüchern (Meliseptol® Wipes sensitive) desinfizieren.
14. Nach der Reinigung und Desinfizierung mindestens 20 Minuten trocknen lassen, bevor die Lockbox erneut verwendet wird.

